

My Mask<sup>®</sup>  
hoe werkt dat?



**ROCKMED** *opto*  
innovation education cooperation

BEKIJK DE TOEKOMST | [WWW.ROCKMEDOPTO.COM](http://WWW.ROCKMEDOPTO.COM)

## screening Me-Check®



2x  MDG level 0

3x  MDG level 1

4x  MDG level 2

6x  MDG level 3

9x  MDG level 4

## en behandeling

Een of twee behandelingen om de 48 uur ter preventie voor patienten die veel te maken hebben met airconditioning, intensief gebruik van beeldschermen, etc.

Drie behandelingen om de 48 uur

Vier behandelingen om de 48 uur

De zes behandelingen met de My Mask® ondersteunen het behandelplan met de Eye-light. De My Mask in deze fase lost niet uw probleem op.

De negen behandelingen met de My Mask® ondersteunen het behandelplan met de Eye-light. De My Mask in deze fase lost niet uw probleem op.

# vraag & antwoord

## Wie levert de My Mask®?

De My Mask® wordt alleen door uw oogarts of optometrist aanbevolen met een bijbehorend behandelplan.

## Wat kost een behandeling?

De My Mask® kost € per behandeling.

## Kan men zien hoeveel behandelingen ik thuis heb gedaan?

Met My Desk kan bijgehouden worden hoeveel behandelingen er thuis uitgevoerd zijn.

## Wat gebeurt er als er onverhoopt iets gebeurt met de My Mask®?

Tussen de fabrikant en de oogarts/optometrist is een verzekering afgesloten voor schade e.d..

## Hoe maak ik de My Mask® schoon?

De My Mask® moet met speciale desinfecterende doekjes worden schoongemaakt. Zorg voor doekjes met CE-keurmerk.

## Wat is het verschil tussen de My Mask® en de Eye mask van Eye-Light®?

De My Mask® levert minder vermogen dan de Eye mask van Eye-Light®. Daarom duurt een behandeling met de My Mask® 20 minuten.

## Hoeveel behandelingen kan de My Mask® uitvoeren?

De My Mask® gaat 500 behandelingen mee en moet dan vervangen worden.